


Rebel RA & GB

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att säkerställa att gånghjälpmedlet fungerar säkert för användaren bör en granskning av gånghjälpen göras en gång per år. Därför rekommenderas följande insatser.

Rengöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

Lacken

Kontrollera skador i lacken, om det upptäcks skador i lacken så använd bättringsfärg för att minska risken för korrosion. Beställ från Human Care, art nr: F2 (se sid. 3).

Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit.

Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Vajrar ska vara hela och uppklamrade.

Vingvred

Kontrollera funktionen.

Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

CE & MD-märkning

Kontrollera att CE och MD märkningen finns kvar och att de går att läsa.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan ljud.

Smörjning

Grindbusningar och gångjärn ska fungera utan ljud. Smörj vid behov.

Framgaffel

Kontrollera att infästningen och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Kontrollera att låsskruven ovanför framgaffeln är helt inskruvad.

Ihopfällningsmekanisk

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

Sittdyna


Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Provkörning

Gör en slutgiltig kontroll genom en provkörning.

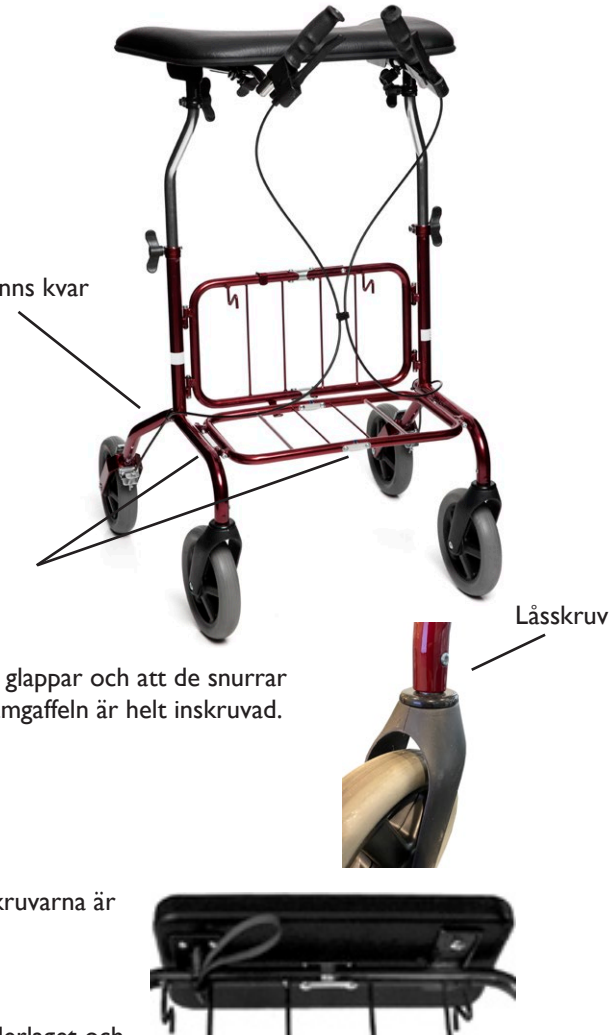

Observera!

Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid byte av delar på hjälpmotorn ska endast originaldelar användas för att Emärkningen ska gälla.

Vid demontering av hjul måste hjulmutter och pinnbult bytas, då de innehåller en självlåsningsmekanism som förstörs när de demonteras.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och lämnas för återvinning.

Avsedd användning

Gåbordet/RA:n får endast användas som gångstöd. Egna ingrepp i hjälpmotorn är inte tillåtet.

Produktnummer:
Ägare:
Anmärkningar / Anteckningar:
Åtgärddad av:
Ort och datum:

Reservdelslista

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
	Hjulkit	4	89015	Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av hjulet.
1	Komplett hjul	4		
2	Hjulmutter	4		
3	Pinnbult	4		
	Pin bolt & Wheel nut	4	89032	Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering.
2	Hjulmutter	4		
3	Pinnbult	4		
	Framgaffelkit	2	89099	Gäller fr.o.m 200907 Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln. Framgaffel kit nr: 89025, enbart för Rebel rollatorer producerade fram t.o.m. April 2024.
	Framgaffel	2		
	Kullager	4		
2	Hjulmutter	2		
3	Pinnbult	2		
	Täckhatt	2		
	Skruv M12x56	2		
	Skruv M6x7	2		
	Bricka	2		
	Läsbricka	2		
	Bromskit	2	89095	Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av bromsen.
4	Bromsinnerdel	2		
5	Bromsytterdel	2		
6	Nit till däckbroms	2		
7	Slitbricka	2		
8	Skruv M6x6	2		
9	Bricka	2		
10	Justerskruv m. kontramutter	2		
11	Fjäder	2		
12	Skruv M6x16	2		
2	Hjulmutter	2		
3	Pinnbult	2		
7	Slitbricka	2	10-004	Slitbrickan vänds vid slitage.
13	Handsbröms komplett	2	10650	
14	Handtag	2	00020	
	RA			
15	RA-Dyna	2	20-054	
16	RA-Dynfäste kompl. höger	1	100-002H	
17	RA-Dynfäste kompl. vänster	1	100-002V	

REKONDITIONERINGSMANUAL

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
GB				
18	Gåbordsdyna	1	20-053	
19	Dynskruv	4	00818	
20	Dynfäste kompl höger	1	100-001H	
21	Dynfäste kompl vänster	1	100-001V	
22	Teleskoprör	2	20-010K	Rebel 67 RA/TW Low
22	Teleskoprör	2	20-010L	Rebel 67 RA/TW Normal
22	Teleskoprör	2	20-011K	Rebel 72 RA/TW Low
22	Teleskoprör	2	20-011L	Rebel 72 RA/TW Normal
Vingvredkomplett		2	50937	Smörj vingvredet vid behov.
23	Vingvred	2		
24	Skruv	2		
25	Bricka	2		
26	Hölje	2	00011	Rebel 67/72 RA/TW Låg
26	Hölje	2	00012	Rebel 67/72 RA/TW Normal
26	Vajer	2	00005	Rebel 67/72 RA/TW Låg/Normal
	Vajerlås	2	10-017	
	Ändavslutning	2	00205	
Sitskit		1	89020	
27	Sittdyna	1		
28	Grindlås	1		
29	Dragögla	1		
30	Skruv M6x20	2		
31	Skruv till grindlås	4		
Sits komplett		1	89070	
27	Sittdyna	1		
30	Skruv M6x20	2		
	Grindskydd	1	50949	
29	Dragögla	1	10-009	
Grindläskit		1	10-018	
28	Grindlås	1		
31	Skruv till grindlås	4		
29	Dragögla	1		
32	Grindöverdel komplett	1	20-047MB	Rebel RA/TW 67
32	Grindöverdel komplett	1	20-047B	Rebel RA/TW 72
32	Grindöverdel komplett m. sits	1	20-037MB	Rebel RA/TW 67
32	Grindöverdel komplett m. sits	1	20-037B	Rebel RA/TW 72
	Reflex	2	00028	
	Bättringsfärg		F2	

