




# Fellow Supreme

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

## Rengöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS:** Använd inte lacknåfta, bensin eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenom. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

## Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

## Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

## Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



### Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

### Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

### Vingvred

Kontrollera funktionen.

### CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

### Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

### Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

### Navkapslar

Kontrollera att de inte saknas.

### Framgafflar

Kontrollera att infästning och lager inte glappar. Kontrollera framgaffelns rotationströghet genom att låta hjulet pendla mellan klockan 3 och 9. De båda hjulen ska pendla 2-4 gånger med max 2 pendlingars differens mellan respektive hjul. Rotationströghet går att efterjustera till önskad tröghet genom att dra åt respektive lossa låsmuttern.

### Sittdyna

Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna. Sittdynan ska gå att fälla upp och ned.

### Ihopfällningsmekanismen

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

### Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

### Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.



## Observera!

Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid byte av delar på hjälpmédlet ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Vid demontering av hjul måste låsmuttern bytas, då den innehåller en självlåsning som förstörs när den demonteras.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och lämnas för återvinning.

## Avsedd användning

Rollatorn får endast användas som gångstöd samt sittstöd vid stillastående. Egna ingrepp i hjälpmédlet är inte tillåtet.

Produktnummer:
Ägare:
Anmärkningar / Anteckningar:
Åtgärdad av:
Ort och datum:


## Reservdelslista

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
	<b>Framgaffel och hjul</b>			Gäller fr.o.m. 201205-201212
1	Plasthatt	2	AL-10147	
2	Låsmutter	2	00888	
3	Kullager	4	00887	
4	Framgaffel	1	-	Ersätts av 89204. *
		1	-	Ersätts av 89206. *
5	Sadelbricka	2	AL-10162	
6	Vågbricka	4	93012008	
7	Passbricka	4	93015026	t=0,8mm
8	Hjul med lager	4	93017025	
9	Glycodurlager	8	930130013	Behöver inte smörjas.
10	Passbricka	4	93015025	t=2mm
11	Bricka	4	89201	t=0,3mm
12	Låsmutter	4	00832	Ska bytas vid demontering.
13	Navkapsel	4	89202	
	<b>Framgaffel och hjul</b>			Gäller fr.o.m. 201212
1	Plasthatt	2	AL-10147	
2	Låsmutter	2	00888	
3	Kullager	4	00887	
4	Framgaffel	1	89204	Vänster
		1	89206	Höger
5	Sadelbricka	2	AL-10162	
6	Vågbricka	4	93012008	
7	Passbricka	4	93015026	t=0,8mm
8	Hjul med lager	4	93017025	
9	Glycodurlager	8	930130013	Behöver inte smörjas.
10	Passbricka	4	93015025	t=2mm
11	Bricka	4	89203	t=1mm
12	Låsmutter	4	00832	Ska bytas vid demontering.
13	Navkapsel	4	89202	
	<b>Broms</b>			Gäller fr.o.m. 201205
14	Bromsbygel	2	89207	
15	Mutterskydd	2	200.1005	
12	Låsmutter	2	00832	Ska bytas vid demontering.
16	Sits komplett	1	AL-10165	Komplett med plattjärn.
17	Dämpare	2	00899	
	<b>Handtag</b>			
18	Grepp	2	AL-10153	
19	Skruv	8	00897	
20	Täckhatt	2	AL-10159	

\*Vid rekonditionering av rollator producerad mellan 201205-201212, skall vid byte till framgaffel 89204 respektive 89206, bricka 89201 ersättas med bricka 89203.

## REKONDITIONERINGSANVISNING

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
21a	<b>Handtagsrör komplett</b> För rollatorer tillverkade innan 202206	1	AL-10168-L	Vänster (handtag komplett, vajer komplett, skruvar, handtagsrör, ändavslutning).
		1	AL-10168-R	Höger (handtag komplett, vajer komplett, skruvar, handtagsrör, ändavslutning).
21b	<b>Handtagsrör komplett</b> För rollatorer tillverkade f.r.o.m. 202206	1	93328	Vänster (handtag komplett, vajer komplett, skruvar, handtagsrör, ändavslutning).
		1	93329	Höger (handtag komplett, vajer komplett, skruvar, handtagsrör, ändavslutning).
22a	<b>Vajer komplett</b> För rollatorer tillverkade innan 202206	2	<b>00891</b>	Komplett med justerskruv.
	Vajer	2		
	Hölje	2		
22b	<b>Vajer komplett</b> För rollatorer tillverkade innan 202206	2	<b>93981</b>	Komplett med justerskruv.
	Vajer	2		
	Hölje	2		
23	Bromsfjäder	2	AL-10142	
24	Vingvred	2	20-052	Smörj vingvredet vid behov.
	<b>Höjdminne komplett</b>	2	<b>AL-10096</b>	
25	Höjdminne	2		
26	Skruv	2		
27	Mutter	2		
28	Plastgaller	1	AL-10150	
29	Reflex	4	00028	
	Bättringsfärg	1	F4	

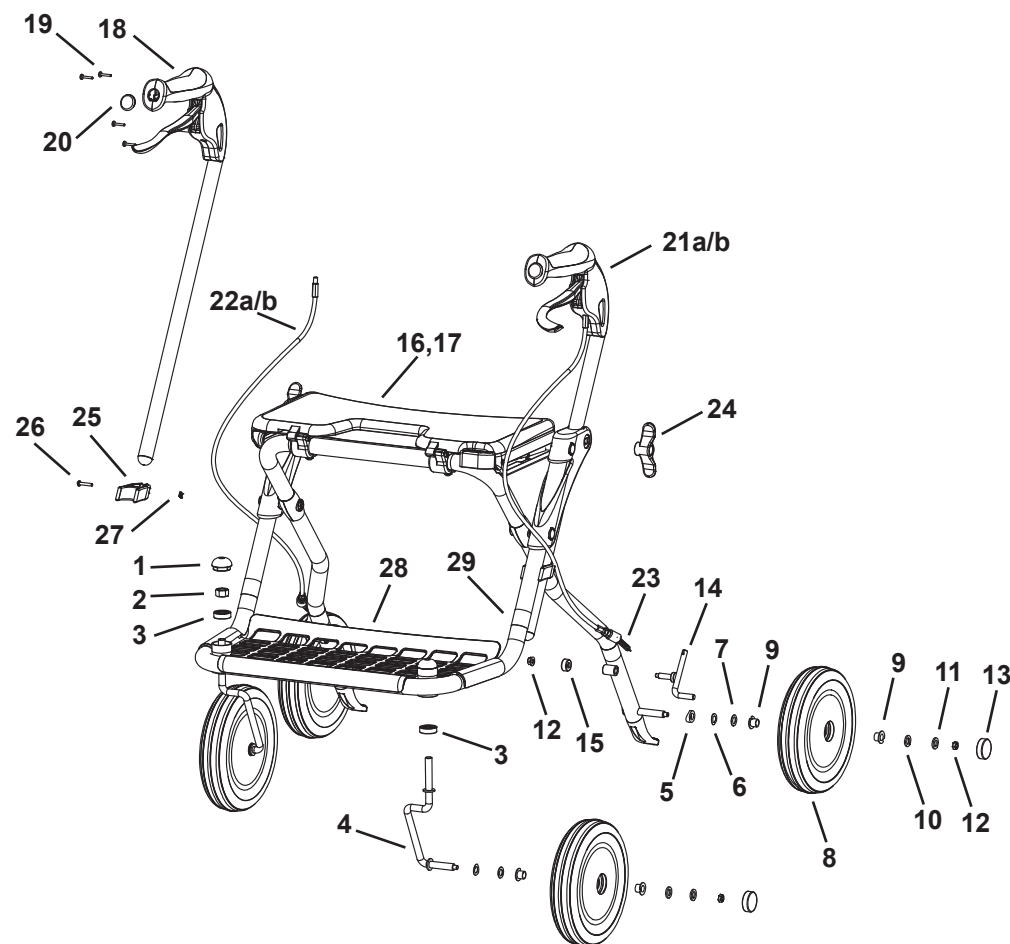

Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm  
Tel. 08 - 510 132 00  
www.humancaregroup.com