



Carl-Oskar RA & GB

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

Regöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensen eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, tränga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

Vingvred

Kontrollera funktionen.

Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan ljud.

Smörjning

Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan ljud. Smörj vid behov.

Framgafflar

Kontrollera att infästning och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Framgaffelns rotationströghet går att efterjustera till önskad tröghet genom att dra åt respektive lossa låsmuttern. **OBS!** Muttern på framgaffeltappen får ej röras.

Ihopfällningsmekanismen

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

Sittdyna

Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.



REKONDITIONERINGSANVISNING

| Nr | Benämning | Antal | Art. nr. | Övrig information |
|----|-----------------------------|----------|---------------|------------------------------------|
| | Vingvred komplett | 2 | 50937 | <i>Smörj vingvredet vid behov.</i> |
| 24 | Vingvred | 2 | | |
| 25 | Skruv | 2 | | |
| 26 | Bricka | 2 | | |
| 27 | Hölje | 2 | 00011 | <i>C-O 67/72 RA/GB Låg</i> |
| 27 | Hölje | 2 | 00012 | <i>C-O 67/72 RA/GB Normal</i> |
| 27 | Vajer | 2 | 00005 | <i>C-O 67/72 RA/GB Låg/Normal</i> |
| | Vajerlås | 2 | 10-017 | |
| | Ändavslutning | 2 | 00205 | |
| | Sitskit | 1 | 89020 | |
| 28 | Sittdyna | 1 | | |
| 29 | Grindlås | 1 | | |
| 30 | Dragögla | 1 | | |
| 31 | Skruv M6x20 | 1 | | |
| 32 | Skruv till grindlås | 4 | | |
| | Sits komplett | 1 | 89070 | |
| 28 | Sittdyna | 1 | | |
| 31 | Skruv M6x20 | 2 | | |
| | Grindskydd | 1 | 50949 | |
| 30 | Dragögla | 1 | 10-009 | |
| | Grindlåskit | 1 | 10-018 | |
| 29 | Grindlås | 1 | | |
| 32 | Skruv till grindlås | 4 | | |
| 30 | Dragögla | 1 | | |
| 33 | Grindöverdel komplett | 1 | 20-047MB | <i>C-O RA/GB 67</i> |
| 33 | Grindöverdel komplett | 1 | 20-047B | <i>C-O RA/GB 72</i> |
| 33 | Grindöverdel kompl. m. sits | 1 | 20-037MB | <i>C-O RA/GB 67</i> |
| 33 | Grindöverdel kompl. m. sits | 1 | 20-037B | <i>C-O RA/GB 72</i> |
| | Reflex | 2 | 00028 | |
| | Bättringsfärg | | F2 | |

