


# Rebel RA & GB

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att säkerställa att gånghjälpmedlet fungerar säkert för användaren bör en granskning av gånghjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande insatser:

## Rengöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 7-8 min kan användas, torkning max 60°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

## Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

## Lacken

Kontrollera skador i lacken, om det upptäcks skador i lacken så använd bättringsfärg för att minska risken för korrosion. Beställ från Human Care, art nr: F2 (se sid. 3).

## Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



### Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit.

### Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Vajrar ska vara hela och uppklamrade.

## Vingvred

Kontrollera funktionen.

## Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

## CE & MD-märkning

Kontrollera att CE och MD märkningen finns kvar och att de går att läsa.

## Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

## Smörjning

Grindbusningar och gångjärn ska fungera utan oljud. Smörj vid behov.

## Framgaffel

Kontrollera att infästningen och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Kontrollera att låsskruven ovanför framgaffeln är helt inskruvad.

## Ihopfällningsmekanisk

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

## Sittdyna


Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna.

## Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

## Provkörning

Gör en slutgiltig kontroll genom en provkörning.

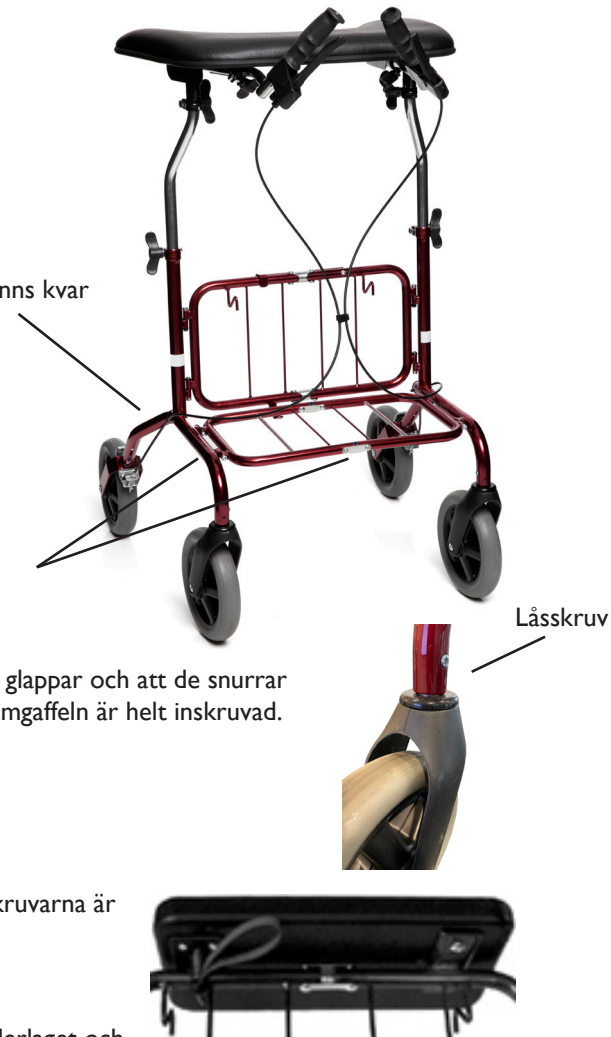



# REKONDITIONERINGSMANUAL

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
<b>GB</b>				
18	Gåbordsdyna	1	20-053	
19	Dynskruv	4	00818	
20	Dynfäste kompl höger	1	100-001H	
21	Dynfäste kompl vänster	1	100-001V	
22	Teleskoprör	2	20-010K	Rebel 67 RA/TW Low
22	Teleskoprör	2	20-010L	Rebel 67 RA/TW Normal
22	Teleskoprör	2	20-011K	Rebel 72 RA/TW Low
22	Teleskoprör	2	20-011L	Rebel 72 RA/TW Normal
<b>Vingvredkomplett</b>		<b>2</b>	<b>50937</b>	Smörj vingvredet vid behov.
23	Vingvred	2		
24	Skruv	2		
25	Bricka	2		
26	Hölje	2	00011	Rebel 67/72 RA/TW Låg
26	Hölje	2	00012	Rebel 67/72 RA/TW Normal
26	Vajer	2	00005	Rebel 67/72 RA/TW Låg/Normal
	Vajerlås	2	10-017	
	Ändavslutning	2	00205	
<b>Sitskit</b>		<b>1</b>	<b>89020</b>	
27	Sittedyna	1		
28	Grindlås	1		
29	Dragögla	1		
30	Skruv M6x20	2		
31	Skruv till grindlås	4		
<b>Sits komplett</b>		<b>1</b>	<b>89070</b>	
27	Sittedyna	1		
30	Skruv M6x20	2		
	Grindskydd	1	50949	
29	Dragögla	1	10-009	
<b>Grindläskit</b>		<b>1</b>	<b>10-018</b>	
28	Grindlås	1		
31	Skruv till grindlås	4		
29	Dragögla	1		
32	Grindöverdel komplett	1	20-047MB	Rebel RA/TW 67
32	Grindöverdel komplett	1	20-047B	Rebel RA/TW 72
32	Grindöverdel komplett m. sits	1	20-037MB	Rebel RA/TW 67
32	Grindöverdel komplett m. sits	1	20-037B	Rebel RA/TW 72
	Reflex	2	00028	
	Bättringsfärg		F2	

