


Staffan Gåbord

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

Regöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 7-8 min kan användas, torkning max 60°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshål blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

Vingvred

Kontrollera funktionen.

CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

Smörjning

Framgafflarna ska fungera utan oljud, smörj vid behov.

Framgafflar

Kontrollera att de snurrar lätt.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.



Reservdelsslista

No	Designation	Quantity	Art. no	Other information
1	Knopp	2	20-014	
	Hjulkit	4	89015	<i>Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av hjulet.</i>
2	Hjul komplett	4		
3	Hjulmutter	4		
4	Pinnbult	4		
	Vingvred Komplet	4	50937	<i>Smörj vingvredet vid behov.</i>
5	Vingvred	4		
6	Skruv	4		
7	Bricka	4		
8	RA handtag	2	20-064	
9	Handbroms komplett	2	10650	<i>Komplett med hållare, bromshandtag och nit.</i>
10	Handtag	2	00020	
11	Gåbordsdyna	1	20-053	
12	Dynfäste Gåbord höger	1	400-026H	<i>Staffan GB låg</i>
12	Dynfäste Gåbord höger	1	400-023H	<i>Staffan GB hög</i>
13	Dynfäste Gåbord vänster	1	400-026V	<i>Staffan GB låg</i>
13	Dynfäste Gåbord höger	1	400-023V	<i>Staffan GB hög</i>
14	Teleskoprör	1	400-025	<i>Staffan GB låg</i>
	Hölje	2	00013	<i>Staffan GB låg</i>
	Hölje	2	00014	<i>Staffan GB hög</i>
	Vajer	2	00005	<i>Staffan GB låg</i>
	Vajer	2	00003	<i>Staffan GB hög</i>

