


COSMOS TAKLYFT

SNABBGUIDE



Komponenter

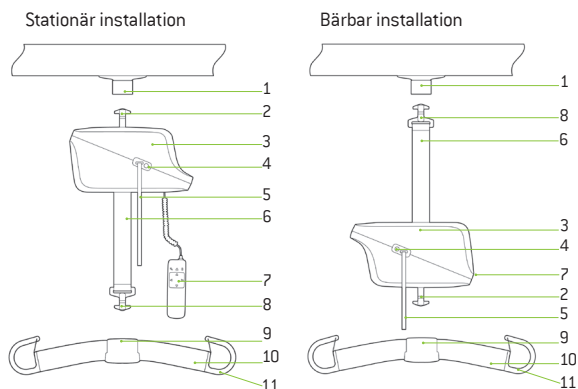

Komponenter:

1. Cosmos löpvagn/adapter
2. Ankarnyckel
3. Lyft
4. Nödstoppsknapp
5. Band för nersänkning i nödsituationer
6. Lyftband
7. Handkontroll
8. Ankarnyckel
9. Låsmekanism
10. Lyftbygel
11. Krok

Innan du använder lyften


Inspektion före användning

– Kontrollera snabbanslutningarna innan du använder lyften: den gröna markeringen på ankarnyckeln ska vara synlig på både lyftbygeln och lyften för att säkerställa en säker anslutning.

Daglig inspektion – Inspektera alltid lyften för att se om det förekommer synliga tecken på skador före användning. Se till att lyften är korrekt monterad på mellanstycket eller löpvagnen samt på lyftbygeln. Kontrollera alltid selar och lyftband före användning för att se om det förekommer tecken på slitage. Använd inte om det finns uppenbart slitage.

Inspektion varje månad – Kontrollera lyftbandet för att se om det förekommer skador eller slitage. Rulla ut lyftbandets hela längd för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Årlig inspektion – Lyften måste inspekteras minst en gång per år av en person med Human Care-behörighet och i enlighet med Human Cares anvisningar.

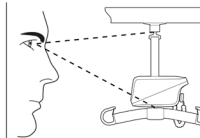

Lyftning

Sänk lyftbandet till en bekväm arbetshöjd. Anslut en lämplig lyftbygel till lyften (läs om hur du ansluter lyftbygeln i bruksanvisningen).

Använd handkontrollen för att placera lyftbygeln direkt ovanför brukaren.

Fäst selen genom att först fästa selens axelögglor på lyftbygeln och därefter benöglorna.

Lyft upp brukaren en bit med lyften och utför en säkerhetskontroll. Fortsätt sedan med överföringen.

Håll inte i krokarna när du utför en lyftning.

Använd inte lyftbygeln för att flytta brukaren och lyften.

Allmän skötsel

	Torka av med en lätt fuktad trödkud.
	Använd aldrig starka rengöringsmedel på lyften.
	Aktivera nödstoppet när lyften inte används.
	Ladda lyften varje natt.
	Desinficera.
	Sänk inte ner i vatten.



Viktigt! Använd handtaget vid transport av lyften. Använd inte lyftbandet eller handkontrollkabeln!

Felsökning

Titta i bruksanvisningen om du har problem.

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen och indikatorlampan inte tänds.

1) *Batterierna är helt urladdade. Ladda lyften omedelbart.* 2) *Nödstoppsknappen är utdragen. Inaktivera genom att trycka in knappen igen.*

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen och indikatorlampan för service tänds.

1) *Kontrollera handkontrollen. Om handkontrollen är skadad måste den bytas ut. Kontakta en servicetekniker.*

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen.

1) *Lyftmotorn är överhettad. Vänta ett tag och försök igen.* 2) *Lyften är överbelastad. Sänk ned med knappen för nersänkning i nödsituationer.*

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen.

1) *Laddning pågår. Avbryt laddning.*

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen på handkontrollen.

1) *Lyften är i sitt översta läge. Tryck på Ned-knappen på handkontrollen.*

Om inget händer när du trycker på Ned-knappen på handkontrollen.

1) *Lyften är i sitt nedersta läge. Tryck på Upp-knappen på handkontrollen för att höja lyften.* 2) *Lyften är inte belastad. Dra försiktigt i bandet eller häng upp en lyftbygel och tryck på Ned-knappen på handkontrollen för att sänka den.*


I händelse av en nödsituation

Nödstopp – I en nödsituation aktiverar du nödstoppet genom att dra i det röda bandet. Denna åtgärd kommer att omedelbart stoppa lyften samtidigt som den röda knappen trycks ut. Återställ nödstoppet genom att trycka tillbaka den röda knappen.


Säkerhetsänkning – Dra först i det röda bandet för att aktivera nödstoppet. Dra och håll sedan i det röda bandet så att säkerhetsänkningen aktiveras. Säkerhetsänkningen får endast användas i nödsituationer, eftersom det är lätt att tappa kontrollen över lyftsituationen och det kan ge upphov till skador.

Nersänkning i nödsituationer – Vid avsaknad av ström eller elektriskt fel i produkten, när brukaren är i lyften, aktiveras nersänkningen i nödsituationer och brukaren sänks ner på ett säkert och tillförlitligt sätt. Beroende på brukarens vikt kan vårdgivaren behöva hjälpa till för att dra ner patienten.

Nödstopp och nersänkning

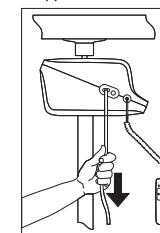

Återställ nödstopp

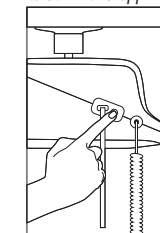

För brukare med pacemaker bör handkontrollen hållas på avstånd från överkroppen, med ett minsta avstånd på 153 mm/6 tum, på grund av magnetfältet.



Viktigt!

Den här snabbguiden ersätter inte bruksanvisningen. Den senaste versionen kan laddas ner på www.humancaregroup.com.

Läs alla instruktioner före användning!